



Importado e distribuído por Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda. CNPJ: 00.130.762/0001-02  
Av. Manoel Ribas, 2183 . Mercês . Curitiba-PR . CEP: 80.810-000

Equipamento isento de registro ou cadastro na ANVISA.



**Serviço de atendimento ao cliente**  
(41) 3888-5555 . [sac@talmax.com.br](mailto:sac@talmax.com.br) . [www.talmax.com.br](http://www.talmax.com.br)




manual aspimax

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Aspirador portátil e extremamente silencioso;
- Regulador de potencia ajustável;
- Duplo sistema de filtragem realizado por um compartimento em tecido e filtro ultrafino;
- Compartimento de resíduos que bloqueia partículas de gesso, óxido e zircônia;
- Unidade de comando independente do compartimento de extração, evitando pó ao mecanismo.

## COMPONENTES

01. Botão seletor de potência
02. Interruptor liga/desliga
03. Conector de energia
04. Parafusos de fixação (troca do saco coletor)
05. Conector da mangueira
06. Mangueira para aspiração
07. Saco coletor (extra)
08. Fusível 5A

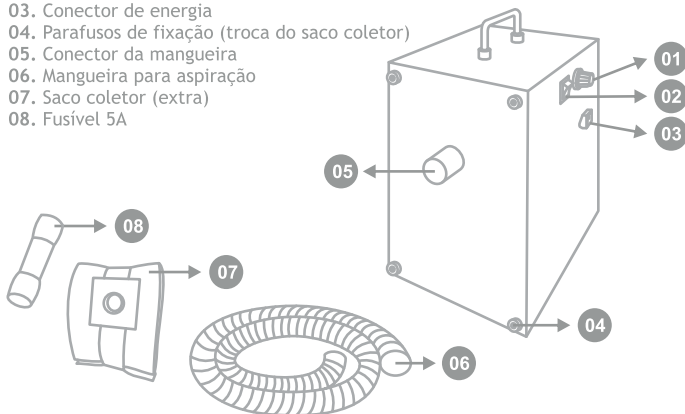

## ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÃO (cm)			PESO (Kg)	VOLTAGEM
L	P	H		
20	29	34	7,2	220V

## PRECAUÇÕES

- Verifique a voltagem (110/220V) antes de conectá-lo à energia;
- Este produto é de uso exclusivo em laboratórios de prótese dentária;
- Não molhe o equipamento e nem utilize o aspirador com as mãos molhadas;
- Nunca use o aspirador sem o saco coletor, pois pode causar danos ao equipamento;
- Nunca aspire qualquer tipo de líquido, especialmente inflamáveis, nem brasas e pontas de cigarro, objetos grandes que possam obstruir ou danificar a mangueira e bocais (tecidos, pedaços grandes de papel, etc.), objetos cortantes que possam rasgar o saco coletor (grampos, alfinetes, agulhas, vidros).

## COMO UTILIZAR

01. Encaixe uma das extremidades da mangueira no aspirador e a outra no equipamento desejado;
02. Coloque o aspirador em um local apropriado;
03. Ligue o cabo à rede elétrica;
04. Para ligar acione o botão liga/desliga;
05. Ajuste a potência de aspiração no botão seletor.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer a limpeza ou manutenção. Quando necessário, limpe com pano úmido, deixando-o secar. Não use álcool, saponáceos, água quente, esponjas ou solventes para a limpeza;
- Nunca use o aspirador sem o saco coletor de pó, pois ele protege o motor e mantém a parte interna do seu aspirador limpa, evitando danificar ou queimar o motor.

## TROCA DO SACO COLETOR

01. Abra a tampa do compartimento de pó, retirando os parafusos de fixação;
02. Retire o saco coletor de pó;
03. Recoloque o saco, fixando-o nos encaixes.

## RECOMENDAÇÕES

---

- Efetue a troca do filtro de exaustão a cada 6 meses;
- É necessário trocar as escovas de carvão quando utilizar o equipamento por mais de 500 horas;
- É necessário trocar o saco coletor quando utilizar o equipamento por mais de 15 dias.
- Caso seja necessário entre em contato com a assistência técnica da Talmax.
- Nunca aspire qualquer tipo de líquido (especialmente inflamáveis), nem brasas e pontas de cigarro, objetos grandes que possam obstruir ou danificar a mangueira e bocais (tecido, pedaços grandes de papel, revestimentos de maços de cigarro etc.), objetos cortantes que possam rasgar o saco descartável (grampos, alfinetes, agulhas, vidros).

## CERTIFICADO DE GARANTIA

---

### Garantia Legal:

Este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da emissão da nota fiscal, de acordo com o que determina o código de defesa do consumidor, observadas as seguintes condições:

01. A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural das peças.
02. A garantia cobrirá a reposição das peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento sem obrigação de troca da unidade completa.
03. Leia atentamente as instruções de instalação e de uso do equipamento. A utilização inadequada, a venda a terceiros, variações da corrente elétrica que possam danificar o equipamento ou consertos realizados por assistência técnica não autorizada acarretarão a perda da garantia.
04. A garantia será prestada na sede da TALMAX ou na rede de assistência técnica autorizada, caso não haja rede autorizada na cidade, o transporte do equipamento, através de encomenda normal dos correios, será pago pela TALMAX.
05. O presente certificado contém todos os termos e condições da garantia dos equipamentos, por ele ficam expressamente anulados quaisquer outros termos ou condições eventualmente mencionados por terceiros que não estejam em conformidade com este certificado.
06. Os consertos se realizarão num prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do equipamento.

### Garantia Estendida:

A TALMAX fornecerá garantia adicional de 90 (noventa) dias a partir do término da garantia legal, observadas as seguintes condições:

01. A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural das peças.
02. Esta garantia não se aplica ao compartimento em tecido, filtro ultra fino e mangueiras.
04. A garantia cobrirá a reposição das peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento sem obrigação de troca da unidade completa.
05. Leia atentamente as instruções de instalação e de uso do equipamento. A utilização inadequada, a venda a terceiros, variações da corrente elétrica que possam danificar o equipamento ou consertos realizados por assistência técnica não autorizadas acarretarão a perda da garantia.
06. A garantia será prestada na sede da TALMAX ou na rede de assistência técnica autorizada, sendo os custos do transporte do equipamento ou danos referentes a este procedimento pagos pelo CONSUMIDOR.
07. O presente certificado contém todos os termos e condições da garantia dos equipamentos, por ele ficam expressamente anulados quaisquer outros termos ou condições eventualmente mencionados por terceiros que não estejam em conformidade com este certificado.
08. Os consertos se realizarão num prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do equipamento.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA TALMAX

---

A Talmax mantém um serviço próprio de assistência técnica para oferecer maior controle de manutenção e qualidade dos equipamentos. Além disso, em uma possível substituição dos componentes, serão utilizadas apenas peças originais do fabricante.

### TALMAX

Av.: Manoel Ribas, 2183 - Mercês - Cep: 80.810-000 - Curitiba-PR  
Fone: (41) 3888-5555