



Talmax



Talmax

Importado e distribuído por Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda. CNPJ: 00.130.762/0001-02
Av. Manoel Ribas, 2183 . Mercês . Curitiba-PR . CEP: 80.810-000

Equipamento isento de registro ou cadastro na ANVISA.



Serviço de atendimento ao cliente
(41) 3888-5555 . sac@talmax.com.br . www.talmax.com.br



manual imer cera

ESPECIFICAÇÕES

VOLTAGEM	POTÊNCIA	PRECISÃO	INTERVALO DE TEMPERATURA
110 ou 220V	60W	50-60Hz	30°C a 120°C

COMO UTILIZAR

- Os diversos compartimentos permitem utilizar até 4 tipos de ceras diferentes;
- Ligue o aparelho na tomada e aperte o interruptor no sentido **I**;
- Escolha a temperatura em °F ou °C, pressionando o botão “S/C”;
- O display indica a temperatura ambiente e começará a aquecer até atingir a temperatura pré-programada no aparelho. Para saber esta temperatura, pressione a tecla **▲** ou **▼** apenas uma vez. Entretanto, isso mudará em 1°C a programação. Caso seja necessário aperte no sentido oposto as teclas **▲▼** para voltar à temperatura programada;
- Escolha a temperatura desejada utilizando as setas **▲▼** (não trabalhe com temperaturas acima de 120°C);
- Após a programação, o display mostrará a temperatura atual, aumentando ou diminuindo progressivamente até atingir a temperatura selecionada. Apenas quando a temperatura programada for maior do que a atual, ao chegar 5°C da temperatura escolhida, a luz vermelha acende e começará a piscar. Assim que atingir a temperatura programada a luz se apagará automaticamente.

PRECAUÇÕES

- Este produto possui uma superfície quente. Evite a proximidade de crianças e de produtos químicos explosivos.
- Trabalhe com o produto em uma superfície horizontal para evitar que a cera líquida derrame.
- Quando não estiver sendo utilizado, mantenha a tampa fechada.
- Não ligue o aparelho acima de 50°C enquanto estiver sem cera ou água para testes.
- Qualquer odor diferente ou fumaça desligue imediatamente o equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da emissão da nota fiscal, de acordo com o que determina o código de defesa do consumidor, observadas as seguintes condições.

- A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural das peças.
- A garantia cobrirá a reposição das peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento sem obrigação de troca da unidade completa.
- Leia atentamente as instruções de instalação e de uso do equipamento. A utilização inadequada, a venda a terceiros, variações da corrente elétrica que possam danificar o equipamento ou consertos realizados por assistência técnica não autorizada acarretarão a perda da garantia.
- A garantia será prestada na sede da TALMAX ou na rede de assistência técnica autorizada, caso não haja rede autorizada na cidade, o transporte do equipamento, através de encomenda normal dos correios, será pago pela TALMAX.
- O presente certificado contém todos os termos e condições da garantia dos equipamentos, por ele ficam expressamente anulados quaisquer outros termos ou condições eventualmente mencionados por terceiros que não estejam em conformidade com este certificado.
- Os concertos se realizarão num prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do equipamento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Talmax mantém um serviço próprio de assistência técnica para oferecer maior controle de manutenção e qualidade dos equipamentos. Além disso, em uma possível substituição dos componentes, serão utilizadas apenas peças originais do fabricante.

TALMAX

Av.: Manoel Ribas, 2183 - Mercês - CEP: 80.810-000 - Curitiba-PR

Fone: (41) 3888-5555