



Importado e distribuído por Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda. CNPJ: 00.130.762/0001-02
Av. Manoel Ribas, 2183 . Mercês . Curitiba-PR . CEP: 80.810-000

Equipamento isento de registro ou cadastro na ANVISA.



Serviço de atendimento ao cliente
(41) 3888-5555 . sac@talmax.com.br . www.talmax.com.br

manual mini bunsen




Bico de bunsen portátil para uso laboratorial.

COMO UTILIZAR

01. Antes de ser utilizado pela primeira vez, é necessário carregar o Mini Bunsen com gás butano através do orifício localizado na parte inferior do equipamento;
02. Para ascender o Mini Bunsen, o anel regulador situado logo abaixo do orifício da chama, deve ser posicionado liberando a passagem de O_2 entre os dois orifícios do anel;
03. Gire a válvula vermelha no sentido “ON” para sair o gás. Em seguida, pressione a mesma válvula para ascender*;
04. Girando o anel regulador para passagem do O_2 , é possível ajustar o tipo de chama que será utilizado para trabalho (ver imagem abaixo);
05. Para apagar a chama, gire a válvula vermelha no sentido “OFF”.

*Possíveis traços de oxidação podem obstruir a faísca, impedindo o acionamento da chama. Caso ocorra, passe uma lixa nestas superfícies para permitir a saída da faísca.

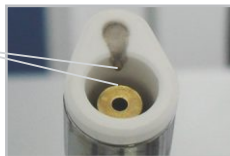

Consumo: 56g/horas

PRECAUÇÕES

- Mantenha este equipamento longe do alcance de crianças;
- Não fazer uso próximo a materiais inflamáveis;
- Não utilize luvas durante a manipulação do equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da emissão da nota fiscal, de acordo com o que determina o código de defesa do consumidor, observadas as seguintes condições:

01. A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural das peças.
02. A garantia cobrirá a reposição das peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento sem obrigação de troca da unidade completa.
03. Leia atentamente as instruções de uso do equipamento. A utilização inadequada, a venda a terceiros, ou consertos realizados por assistência técnica não autorizada acarretarão a perda da garantia.
04. A garantia deste equipamento não se aplica se for detectado mal uso, tal como, deixar acumular sujeira ou oxidação nos contatos da chama.
05. A garantia será prestada na sede da TALMAX ou na rede de assistência técnica autorizada, caso não haja rede autorizada na cidade, o transporte do equipamento, através de encomenda normal dos correios, será pago pela TALMAX.
06. O presente certificado contém todos os termos e condições da garantia dos equipamentos, por ele ficam expressamente anulados quaisquer outros termos ou condições eventualmente mencionados por terceiros que não estejam em conformidade com este certificado.
07. Os consertos se realizarão num prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento do equipamento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Talmax mantém um serviço próprio de assistência técnica para oferecer maior controle de manutenção e qualidade dos equipamentos. Além disso, em uma possível substituição dos componentes, serão utilizadas apenas peças originais do fabricante.

TALMAX
 Av. Manoel Ribas, 2183 - Mercês - Cep: 80.810-000 - Curitiba-PR
 Fone: (41) 3888-5555