

**DIE HARDENER  
(IMPERMEABILIZANTE)**

Atualizado 02/08/06

Revisado 27/10/09

Este produto foi desenvolvido para ser aplicado no modelo de gesso tornando-o resistente a eventuais desgastes e impermeável à água. Suas características facilitam a aplicação cerâmica nas regiões de contato e são ideais para enceramentos convencionais, massa de ombro e no sistema de cerâmica prensada.

Através da sua fórmula exclusiva, o Die Hardener proporcionará a região aplicada a mesma dimensão de trabalho moldada pelo Dentista, impedindo que haja qualquer variação dimensional sobre o modelo, pois não cria película sobre a superfície do gesso. Desta forma, o técnico pode aplicar o produto sobre todas as regiões do troquel antes do enceramento, inclusive sobre o limite cervical.

**APLICAÇÃO**

Aplique o Die Hardener com um pincel médio (n.º 6) em toda a superfície do modelo seco. Aguarde aproximadamente 10 minutos e em seguida realize o isolamento e o enceramento do trabalho.

**Importante:** Lave o pincel com detergente/água e mantenha sempre a embalagem fechada em local arejado após cada aplicação.